

SENSITITRE

ANO2B

Anaerobe Reference Card

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A/S2 0.5/0.25	A/S2 1/0.5	A/S2 2/1	A/S2 4/2	A/S2 8/4	A/S2 16/8	AUG2 0.5/0.25	AUG2 1/0.5	AUG2 2/1	AUG2 4/2	AUG2 8/4	AUG2 16/8
B	TANS 4	TANS 8	TANS 16	TANS 32	TANS 64	PEN 0.06	PEN 0.12	PEN 0.25	PEN 0.5	PEN 1	PEN 2	PEN 4
C	IMI 0.12	IMI 0.25	IMI 0.5	IMI 1	IMI 2	IMI 4	IMI 8	MERO 0.5	MERO 1	MERO 2	MERO 4	MERO 8
D	CLI 0.25	CLI 0.5	CLI 1	CLI 2	CLI 4	CLI 8	FOX 1	FOX 2	FOX 4	FOX 8	FOX 16	FOX 32
E	MRD 0.5	MRD 1	MRD 2	MRD 4	MRD 8	MRD 16	CHL 2	CHL 4	CHL 8	CHL 16	CHL 32	CHL 64
F	AMP 0.5	AMP 1	AMP 2	AMP 4	AMP 8	AMP 16	PIP 4	PIP 8	PIP 16	PIP 32	PIP 64	PIP 128
G	TET 0.25	TET 0.5	TET 1	TET 2	TET 4	TET 8	MEZ 4	MEZ 8	MEZ 16	MEZ 32	MEZ 64	MEZ 128
H	P/T4 0.25/4	P/T4 0.5/4	P/T4 1/4	P/T4 2/4	P/T4 4/4	P/T4 8/4	P/T4 16/4	P/T4 32/4	P/T4 64/4	P/T4 128/4	POS	POS

ANTIMICROBICS

A/S2	Ampicillin / sulbactam 2:1 ratio
TANS	Cefotetan
IMI	Imipenem
CLI	Clindamycin
MRD	Metronidazole
AMP	Ampicillin
TET	Tetracycline
P/T4	Piperacillin / tazobactam constant 4
PEN	Penicillin
AUG2	Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio
FOX	Cefoxitin
CHL	Chloramphenicol
PIP	Piperacillin
MEZ	Mezlocillin
MERO	Meropenem
POS	Positive Control

Indicates Sensititre® range where different to CLSI M11. For current Quality Control ranges refer to QC range document.

Sensititre® Bereich wo unterschiedlich zu CLSI M11. Für gegenwärtige Qualitätskontrolle beziehen sich Strecken auf QC Strecke Dokument.

Indica el rango esperado con Sensititre® en caso de diferir del establecido por el CLSI M11. Para el control de calidad actual las gamas refieren al documento de la gama de QC.

Indicare il range del Sensititre® laddove è differente dal CLSI M11. Per controllo di qualità corrente le gamme si riferiscono al documento della gamma di QC.

Δείχνει τη σειρά Sensititre® όπου διαφορετικός σε CLSI M11. Για τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο οι σειρές αναφέρονται ως στο έγγραφο σειράς.

Indique où la gamme Sensititre® est différente à CLSI M11. Pour les gammes actuelles du contrôle Qualité, se référer au document de gamme de QC.

RANGES

Antimicrobial

Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio
Ampicillin
Ampicillin / sulbactam 2:1 ratio
Cefotetan
Cefoxitin
Chloramphenicol
Clindamycin
Imipenem
Meropenem
Metronidazole
Mezlocillin
Penicillin
Piperacillin
Piperacillin / tazobactam constant 4
Tetracycline
Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio
Ampicillin
Ampicillin / sulbactam 2:1 ratio
Cefotetan
Cefoxitin
Chloramphenicol
Clindamycin
Imipenem
Meropenem
Metronidazole
Mezlocillin
Penicillin
Piperacillin
Piperacillin / tazobactam constant 4

Organism

Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741

Range (µg/ml)

0.25/0.12–1/0.5
8–>16#
0.5/0.25–2/1
1–8
2–8
4–16
0.5–2
0.03–0.25
0.03–0.25
0.25–2
8–32#
8–32
4–16
0.03/4–0.25/4
≤0.25–1#
0.25/0.12–1/0.5
8–32#
0.5/0.25–2/1
16–128
8–64
4–16#
2–8
0.12–0.5#
0.06–0.5
0.5–4
8–32#
8–32
8–64
2/4–16/4

SENSITITRE
ANO2B
 Anaerobe Reference Card

Tetracycline	Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741	8–32#
Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 ratio	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.5/0.25–2/1#
Ampicillin	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.5–2#
Ampicillin / sulbactam 2:1 ratio	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.5/0.25–2/1
Cefotetan	Eubacterium lentum ATCC 43055	16–64
Cefoxitin	Eubacterium lentum ATCC 43055	2–16
Clindamycin	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.06–0.25
Imipenem	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.25–2
Meropenem	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.12–1
Metronidazole	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.12–0.5
Mezlocillin	Eubacterium lentum ATCC 43055	8–32#
Penicillin	Eubacterium lentum ATCC 43055	0.25–2#
Piperacillin	Eubacterium lentum ATCC 43055	8–32
Piperacillin / tazobactam constant 4	Eubacterium lentum ATCC 43055	8/4–32/4

ANO2B

A/S2 0.5/0.25	A/S2 1/0.5	A/S2 2/1	A/S2 4/2	A/S2 8/4	A/S2 16/8	AUG2 0.5/0.25	AUG2 1/0.5	AUG2 2/1	AUG2 4/2	AUG2 8/4	AUG2 16/8
TANS 4	TANS 8	TANS 16	TANS 32	TANS 64	PEN 0.06	PEN 0.12	PEN 0.25	PEN 0.5	PEN 1	PEN 2	PEN 4
IMI 0.12	IMI 0.25	IMI 0.5	IMI 1	IMI 2	IMI 4	IMI 8	MERO 0.5	MERO 1	MERO 2	MERO 4	MERO 8
CLI 0.25	CLI 0.5	CLI 1	CLI 2	CLI 4	CLI 8	FOX 1	FOX 2	FOX 4	FOX 8	FOX 16	FOX 32
MRD 0.5	MRD 1	MRD 2	MRD 4	MRD 8	MRD 16	CHL 2	CHL 4	CHL 8	CHL 16	CHL 32	CHL 64
AMP 0.5	AMP 1	AMP 2	AMP 4	AMP 8	AMP 16	PIP 4	PIP 8	PIP 16	PIP 32	PIP 64	PIP 128
TET 0.25	TET 0.5	TET 1	TET 2	TET 4	TET 8	MEZ 4	MEZ 8	MEZ 16	MEZ 32	MEZ 64	MEZ 128
P/T4 0.25/4	P/T4 0.5/4	P/T4 1/4	P/T4 2/4	P/T4 4/4	P/T4 8/4	P/T4 16/4	P/T4 32/4	P/T4 64/4	P/T4 128/4	POS	POS